



DAC-SpectroMed s.r.l.

МД-2012, Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, 47, кв. 64
Тел.: +37322/ 574900, 574922/23; факс: +37322/ 574920
Email: office@dacspectromed.com
www.dacspectromed.com

AFP-S-Strip-DAC

Код 4198AFP1 1 тест

РТ MD 11-15796482-005:2006

Только для диагностики «in vitro»

Хранить при 18-30°C

Тест-полоска для определения альфафетопротеина в сыворотке, плазме

ВВЕДЕНИЕ

AFP-S-Strip-DAC является прямым связывающим экспресс тестом для определения альфафетопротеина (AFP) в сыворотке при диагностике первичной гепатоцеллюлярной карциномы, тестикулярной тератокарциномы и дефектов нервной трубки. Тест основан на принципе сэндвичевого иммуноанализа. Для специфической идентификации AFP используются моноклональные и поликлональные антитела (иммуноглобулины).

Данный экспресс-тест занимает около 10-20 минут.

Чувствительность теста – 25 ng/mL.

СБОР ПРОБ

Для получения сыворотки следует собрать кровь в контейнер без антикоагулянта.

Оставьте кровь сворачиваться и отделите сыворотку из сгустка. Сыворотку используйте для тестирования.


Если тестирование пробы не может быть произведено в тот же день, храните пробу в холодильнике или морозильнике.

Перед тестированием доведите пробы до комнатной температуры.

Повторное замораживание не допустимо.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Пользуясь иллюстрацией, погрузите тест-полоску стрелкой вниз в сосуд с сывороткой примерно на 10 секунд. Не погружайте ниже максимальной отметки (на рис. Marker Line).
2. Инкубируйте 10 минут и считайте результаты. Не считывайте результаты по истечении 30 минут.

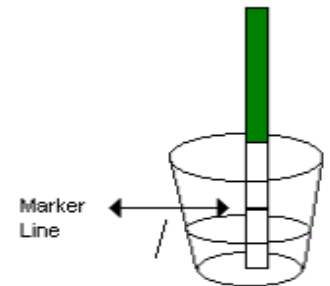


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

➤ **Negative (отрицательный):** появляется только одна цветная линия на контрольном участке. На тестовом участке видимая линия не появляется.

➤ **Positive (положительный):** в дополнение к контрольной полосе розового цвета появляется четкая розовая полоса на тестовом участке. Это означает, что концентрация AFP выше, чем 25 ng/mL. Если по степени окрашивания тестовая полоса равна контрольной полосе или темнее, это означает, что концентрация AFP в пробе равна 400 ng/ml или выше. Следует обратиться к врачу для проведения более обстоятельного обследования.

➤ **Invalid (недействительный):** отсутствие окрашивания на обоих участках является индикатором ошибки в процедуре и/или порчи реагента.

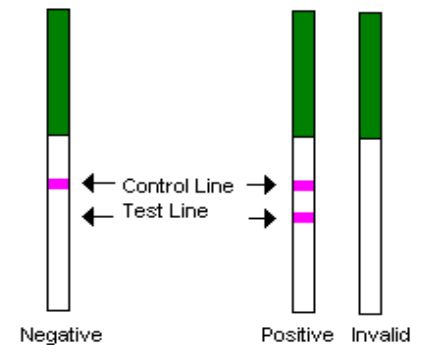

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест-наборы можно хранить при комнатной температуре (18-30°C) в запечатанной упаковке до истечения срока годности.

Тест-наборы следует беречь от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Только для диагностики *in vitro*.
2. Не использовать тест-наборы после истечения срока годности.
3. Тест-устройство не следует использовать повторно.